


UM 500 – Das Urinmess-System



- Anwendergerechtes und exaktes Bilanzieren des Flüssigkeitshaushalts mit einem Optimum an hygienischer Sicherheit

Hygienische Sicherheit

Die integrierte Tropfkammer mit bakteriendichter Belüftung und Membran-Rückflusssperre garantiert in Verbindung mit einer zusätzlichen ① Rückflusssperre im Auffangbeutel die hygienische Sicherheit und schützt vor retrograder Keimwanderung.

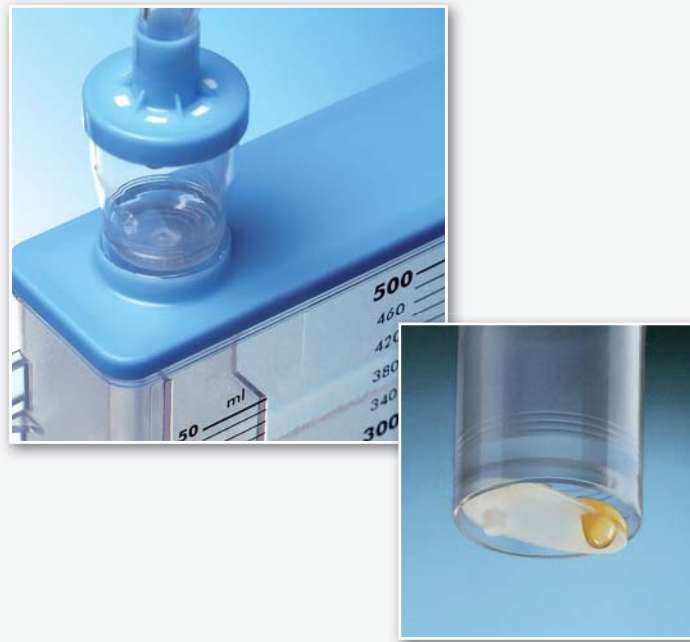

Individuelle Befestigung

Eine elastische Lochbandbefestigung oder alternativ dazu Spezialhaken für Systemschienen (Dräger) sorgen für eine sichere und individuelle Befestigung des Systems.





Schnelle Entleerung

Durch die Kombination eines großlumigen, leichtgängigen Drehventils und eines optimalen Druckausgleichs im System (bakteriendichte Belüftung von Tropfkammer, Messkammer und ② Auffangbeutel) wird eine schnelle Entleerung der Messkammer gewährleistet.













Präzises Ablesen

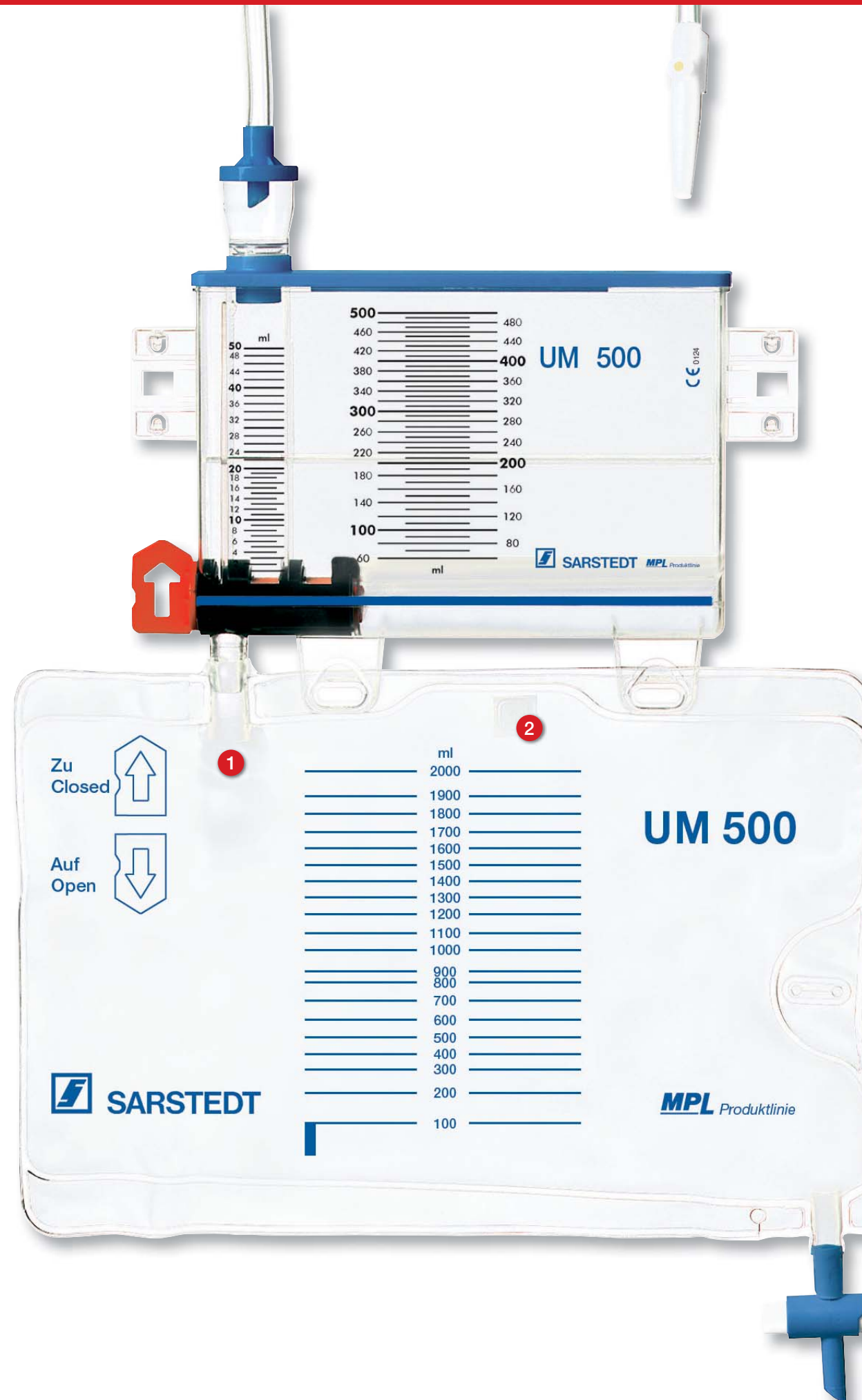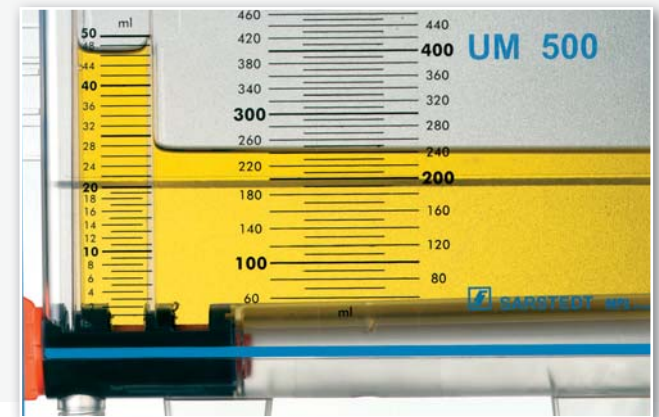Die präzise, leicht ablesbare Graduierung ermöglicht eine millilitergenaue Erfassung von Kleinstmengen. Das Gesamtmessvolumen von 500 ml sowie die übersichtliche und klare Graduierung erlauben exakte Bilanzierung auch bei hohen Ausscheidungsraten. Mengen über 500 ml werden automatisch durch den Überlauf in den Auffangbeutel geleitet.

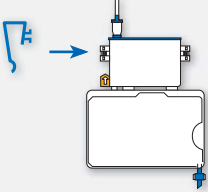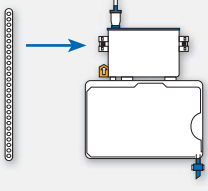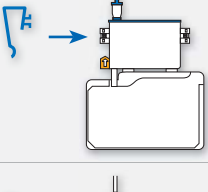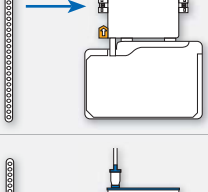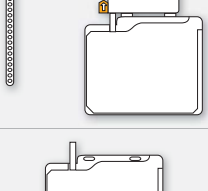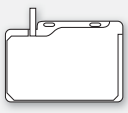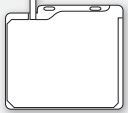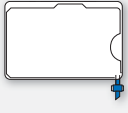

Bestellinformationen UM 500

	Bezeichnung	Bestell Nummer	VE/Stück
	Urinmess-System UM 500 mit 2.000 ml Ablasshahn-Beutel Hakenbefestigung für System-Schienen	74.5610.100	15
<i>einzel</i> <i>verpackt</i> , <i>steril</i>			
	Urinmess-System UM 500 mit 2.000 ml Ablasshahn-Beutel Lochband-Befestigung	74.5610.200	15
<i>einzel</i> <i>verpackt</i> , <i>steril</i>			
	Urinmess-System UM 500 mit 1.800 ml Wechsel-Beutel Hakenbefestigung für System-Schienen	74.5620.100	15
<i>einzel</i> <i>verpackt</i> , <i>steril</i>			
	Urinmess-System UM 500 mit 1.800 ml Wechsel-Beutel Lochband-Befestigung	74.5620.200	15
<i>einzel</i> <i>verpackt</i> , <i>steril</i>			
	Urinmess-System UM 500 mit 3.000 ml Wechsel-Beutel Lochband-Befestigung	74.5630.200	15
<i>einzel</i> <i>verpackt</i> , <i>steril</i>			
	Wechsel-Beutel 1.800 ml	74.5622.005	100
<i>einzel</i> <i>verpackt</i> , <i>steril</i>			
	Wechsel-Beutel 3.000 ml	74.5624.005	100
<i>einzel</i> <i>verpackt</i> , <i>steril</i>			
	Wechsel-Beutel 2.000 ml mit Ablasshahn	74.5623.005	100
<i>einzel</i> <i>verpackt</i> , <i>steril</i>			
	Ersatz-Lochbänder	74.5763.010	50
	Zusatz-Halter für breite Bettenholme	74.5650.010	150

SARSTEDT AG & Co.
 Postfach 12 20 · D-51582 Nümbrecht
 Telefon (+49) 0 22 93 30 50
 Telefax (+49) 0 22 93 305-282
☎ Service 0800 (Deutschland)
 Telefon (0800) 0 83 30 50
 info@sarstedt.com
 www.sarstedt.com