

# Die neue Generation der Safety-Lanzette

Für die sichere, komfortable und schonende Punktion



## Sicherheit für Anwender und Patient

- Nadel und Klinge befinden sich vor und nach Gebrauch stets sicher im Lanzettengehäuse
- Nadelstichverletzungen und Kreuzkontaminationen werden verhindert
- Das sterile Einmalprodukt ist nicht wieder verwendbar


## Anwenderfreundliche Handhabung

- Einfache Anwendung durch bereits vorgespanntes System
- Gesicherter Auslöseknopf ohne Risiko einer versehentlichen Auslösung und Inaktivierung des Lanzettensystems
- Guter Griff durch geriffelte abgeflachte Oberfläche
- Zielgenaue Punktion durch kleine Auflagefläche

## Patientenkomfort

- Geringes Schmerzempfinden durch ultrascharfe, silikonisierte Klingen und 3-fach geschliffene Nadelspitzen
- Exakt vorbestimmte Einstichtiefen für garantiert gute Ergebnisse bei Kindern und Erwachsenen
- Keine Gefahr von Knochenverletzungen durch minimale Einstichtiefen

# Die neue Generation der Safety-Lanzette

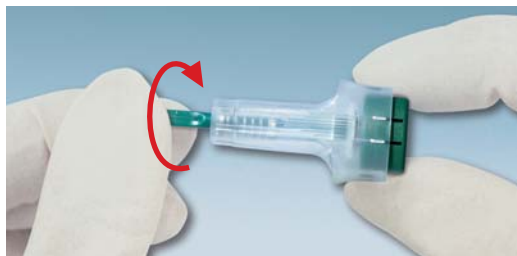

1 Schutzkappe abdrehen.



2 Safety-Lanzette gegen die ausgewählte und desinfizierte Punktionsstelle halten. Auslöseknopf drücken.



3 Safety-Lanzette in eine geeignete Entsorgungsbox geben.

## Bestellinformation

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Nadelgröße	Einstichtiefe	Verpackung
85.1015	Safety-Lanzette <b>Mini</b>	28 G	1,6 mm	200/IK, 1.200/UK
85.1016	Safety-Lanzette <b>Normal</b>	21 G	1,8 mm	200/IK, 1.200/UK
85.1017	Safety-Lanzette <b>Extra</b>	18 G	1,8 mm	200/IK, 1.200/UK
85.1018	Safety-Lanzette <b>Super</b>	Klinge 1,5 mm	1,6 mm	200/IK, 1.200/UK
85.1019 (Für Säuglings-Fersen)	Safety-Lanzette <b>Neonatal</b>	Klinge 1,5 mm	1,2 mm	200/IK, 1.200/UK

Technische Änderungen vorbehalten

Diese Publikation kann Informationen zu Produkten enthalten, die evtl. nicht in jedem Land verfügbar sind

## Microvette® Kapillarblut-Entnahmesysteme runden das Produktprogramm ab



Microvette® 100/200 – Blutentnahme mit End-to-End Kapillare



Microvette® 300/500 – Blutentnahme mit dem Abnehmerand

Gerne senden wir Ihnen entsprechendes Informationsmaterial zu.

SARSTEDT AG & Co.  
Postfach 12 20 · D-51582 Nümbrecht  
Telefon (+49) 0 22 93 30 50  
Telefax (+49) 0 22 93 305-282  
☎ **Service 0800 (Deutschland)**  
Telefon (0800) 0 83 30 50  
info@sarstedt.com  
www.sarstedt.com