

Prodotti per la Sicurezza

Con noi sei già al sicuro

NUOVO!



11 Maggio 2013:
Adozione della Direttiva Europea
2010/32/EU in Legge Nazionale

Protegete Voi stessi ed i Vostri pazienti

...con la soluzione completa di sicurezza
per il prelievo ematico SARSTEDT



SARSTEDT

La Direttiva Europea per la prevenzione di ferite da aghi negli Ospedali e nel Settore Sanitario

L'obiettivo della Direttiva Europea 2010/32/EU per la prevenzione dalle ferite da taglio negli Ospedali e nel settore sanitario da adottare entro l'11 Maggio 2013 a livello nazionale, cerca di garantire la maggior sicurezza dell'ambiente di lavoro per gli operatori sanitari.

Gli operatori del Settore Sanitario sono a rischio di punture e ferite da taglio. Gli operatori possono essere infettati da agenti patogeni nel sangue (virus, batteri, funghi ed altri microrganismi). I virus più diffusi sono HIV, Epatite B (HBV) e C (HCV), ma ci sono oltre 20 patologie che possono essere trasmesse per via ematica.

La prevenzione e protezione obbligatoria prevede:

- Eliminazione dell'uso di oggetti taglienti ove non necessari
- Adozione di dispositivi con meccanismi di protezione e sicurezza integrati
- Implementazione di protocolli per lavorare in sicurezza
- Implementazione di procedure per l'uso e lo smaltimento sicuro di dispositivi medicali taglienti
- Divieto del ri-incappucciamento degli aghi usati
- Utilizzo di dispositivi di protezioni individuali

Pubblicazioni:

- Case study: Needlestick – how to prevent needlestick injuries, EU-OSHA – European Agency for Safety and Health at Work, source: <http://osha.europa.eu/data/case-studies/needlestick-2014-how-to-prevent-needlestick-injuries-effectively>
- E-Facts 40: Gefährdungsbeurteilung und Nadelstichverletzungen, EU-OSHA – European Agency for Safety and Health at Work, source: <http://osha.europa.eu/de/publications/e-facts/efact40>
- NHS information, source: http://www.nhsemployers.org/EmploymentPolicyAndPractice/European_employment_policy/Pages/Initiatives-On-Needlestick-Injuries.aspx

Aghi di Sicurezza - La sicurezza nel prelievo ematico



Sistema pre-assemblato

L'Ago di Sicurezza è già pronto all'uso; non va assemblato alla camicia.



Puntura sicura

...angolo di attacco acuto particolarmente adatto per vene fragili

Protezione dell'ago di sicurezza

La particolare protezione dell'Ago di Sicurezza permette il completamento in sicurezza del prelievo ematico con il bloccaggio dell'ago nella custodia di protezione. Successivamente il dispositivo può essere smaltito in un apposito contenitore per oggetti taglienti.



Safety-Multifly® – Sicurezza per vene fragili

Protezione dell'ago con una sola mano, adattatore pre-assemblato, imballaggio e materiale ottimali

La possibilità di chiusura del sistema di protezione del Safety-Multifly® con una sola mano garantisce massima maneggevolezza.

L'adattatore per S-Monovette® è già assemblato al Safety-Multifly® rendendo il sistema pronto all'uso. L'imballaggio ed il tubo sono dimensionati alle esigenze del prelievo ematico e al successivo smaltimento nei contenitori per oggetti taglienti.



Lancette di sicurezza – Prelievo sicuro e semplice con confort migliorato per il paziente

- Prodotto sterile e monouso, previene i rischi di punture accidentali dato che l'ago e/o la lama si trovano coperti all'interno del dispositivo sia prima che dopo l'uso.
- Vasta gamma di formati di aghi e lame con profondità di penetrazione predefinita per prelievo da dito, lobo e tallone.
- Caricato e pronto all'uso, facile rimozione del coperchio di protezione dell'ago per un uso immediato.
- Alette e scanalature nell'involucro assicurano una presa sicura e una elevata maneggevolezza.





Contenitori per smaltimento Multi-Safe

- Eliminazione facile e sicura di oggetti taglienti
- La dimensione dell' apertura può essere ingrandita spezzando le due sezioni perforate prima di assemblare il coperchio
- Aiuto universale per la rimozione di sistemi Luer lock e penne da insulina

Il nostro servizio – Il Vostro vantaggio



I nostri specialisti qualificati sono sempre disponibili per qualsiasi informazione e supporto. Corsi di formazione di gruppo o individuali sono disponibili per assicurare che i prodotti siano utilizzati correttamente e che gli operatori seguano adeguatamente le procedure di sicurezza.



Per noi **servizio** e **collaborazione** comprendono il supporto diretto a tutto il Vostro personale che utilizza o utilizzerà in futuro i nostri prodotti.

SARSTEDT S.r.l.
Via della Siderurgia, 12
37139 Verona - ZAI 2
Tel. 045 8510114
Fax 045 8510118
info.it@sarstedt.com
www.sarstedt.com