

S-Sedivette®

Handhabung

1



Unmittelbar vor der Blutentnahme die S-Sedivette® mit einer Safety-Kanüle für die Blutentnahme mittels Aspirationstechnik komplettieren.

2




Führen Sie die Blutentnahme entsprechend Ihrer Arbeitsanweisung durch.

3




Nach der Blutentnahme den Kolben **unbedingt** einrasten und die Kolbenstange abbrechen!

4

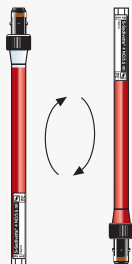

Die Blutprobe sofort gründlich mischen. Die S-Sedivette® fünfmal langsam über Kopf schwenken. Die Luftblase/Glasperle muss immer bis zum anderen Ende durchwandern! Kein schnelles Hin- und Herschütteln.

5

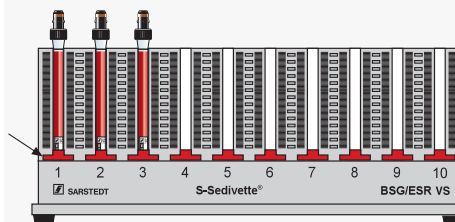


Die BSG-Bestimmung sollte innerhalb 4 Std. nach der Blutentnahme beendet sein. Die S-Sedivette® **vor Starten der Blutsenkung** noch einmal gründlich mischen. Dann den S-Sedivetten-Ständer bestücken und mit den Rändelschrauben (Pfeil) den Nullpunkt jeder Probe einstellen.

Hinweis für die Barcode-Etikettierung:




Etikett am Boden der S-Sedivette® ansetzen.

Richtig!

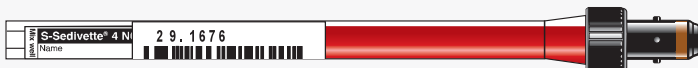

Falsch!

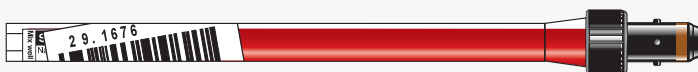

Falsch!

SARSTEDT AG & Co. KG
Postfach 12 20 · D-51582 Nümbrecht
Telefon: +49 2293 305 0
Telefax: +49 2293 305 3450
Kundenservice Deutschland
Telefon 0800 0 83 305 0
info@sarstedt.com
www.sarstedt.com

 **SARSTEDT**