



Aguja de seguridad

Instrucciones de uso

Antes de la extracción de sangre

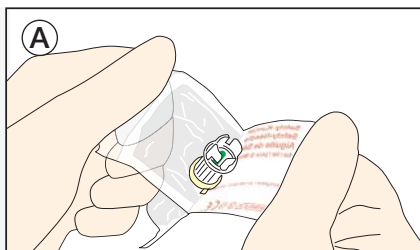


Abra el envase con el pulgar y el índice mediante la técnica "Peel-off" (separando ambas láminas).

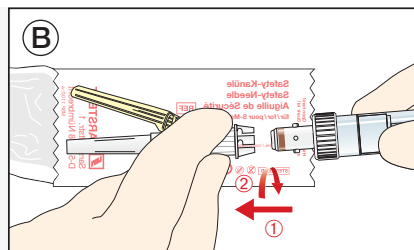


Conecte la S-Monovette® al adaptador de la aguja de seguridad.

O

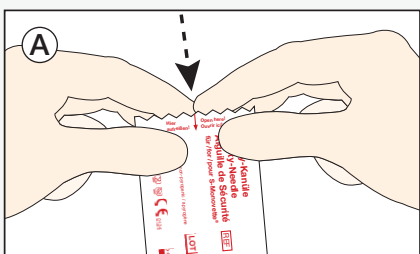


Desgarre el envase a lo largo de la flecha central.

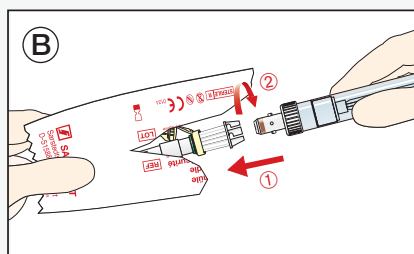


Conecte la S-Monovette® al adaptador de la aguja de seguridad.

Después de la extracción de sangre

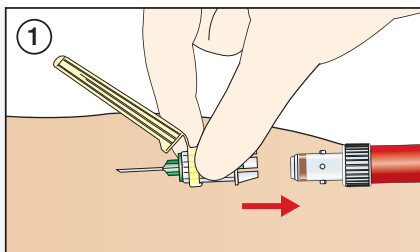


Desconecte la última S-Monovette® de la aguja de seguridad y después extraiga la aguja de la vena.


Activación del protector de la aguja...

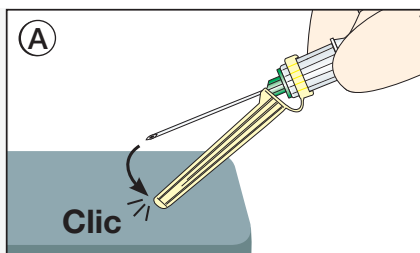

Apoye el protector de aguja sobre una superficie estable y actívelo.

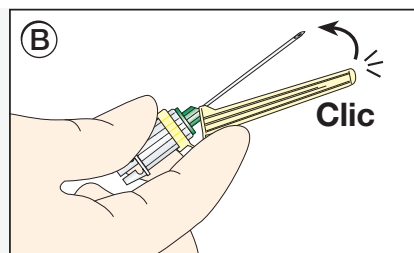

También puede activar el protector de aguja con el índice en el extremo inferior.

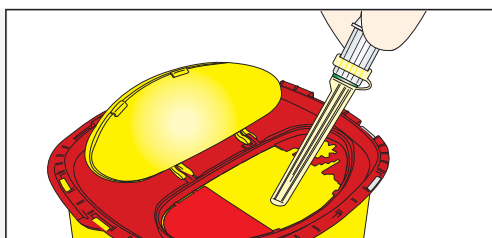


Tras activar el protector de aguja, deseche la aguja de seguridad en un recipiente de eliminación.


Aguja Multifly® de seguridad

Instrucciones de uso

Antes de la extracción de sangre

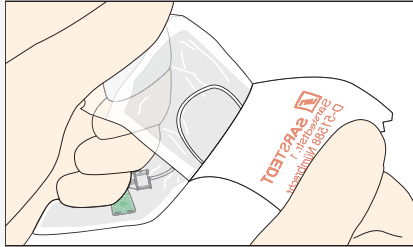


Abra el envase con el pulgar y el índice mediante la técnica "Peel-off" (separando ambas láminas).

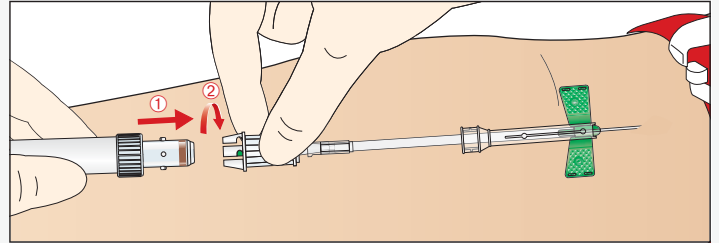

Conecte la S-Monovette® al adaptador de la aguja Multifly® de seguridad.


Después de la extracción de sangre

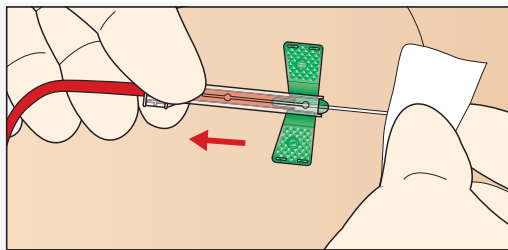

Sujete el protector de aguja entre el pulgar y el índice por la parte inferior y extraiga la aguja Multifly® de seguridad de la vena.


Activación del protector de la aguja...

...en la vena

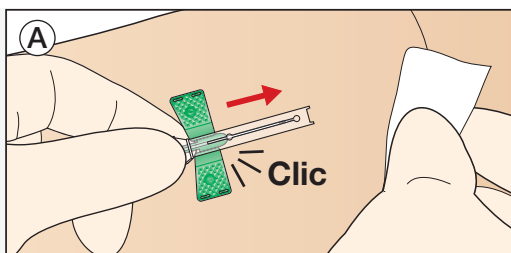


Active el protector de aguja al mismo tiempo que extrae la aguja Multifly® de seguridad de la vena.

...fuera de la vena

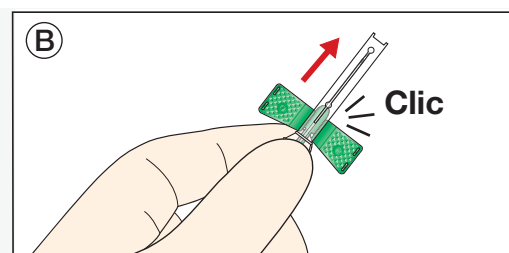

Extraiga la aguja Multifly® de seguridad de la vena y active el protector de aguja.

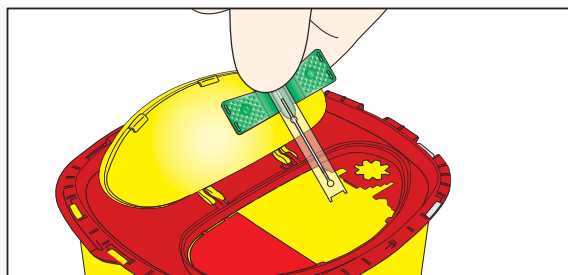

Tras activar el protector de aguja, deseche la aguja Multifly® de seguridad en un recipiente de eliminación.

SARSTEDT S.A.U.
Camí de Can Grau, 24
Pol. Ind. Valloriolf
08430 La Roca del Vallès
Tel: +34 93 846 4103
Fax: +34 93 846 3978
info.es@sarstedt.com
www.sarstedt.com