



Bezpečnostní jehla

Informace o používání

Před odběrem krve

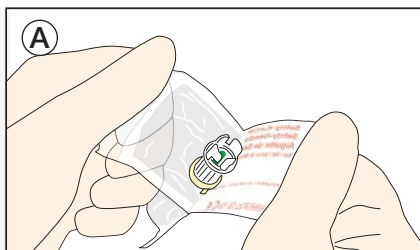


Obal otevřete palcem a ukazováčkem tak, že od sebe vrstvy odtrhnete.

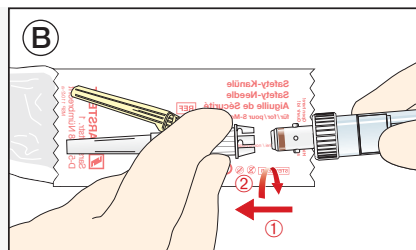


Zkumavku S-Monovette® spojte s držákem bezpečnostní jehly.

NEBO

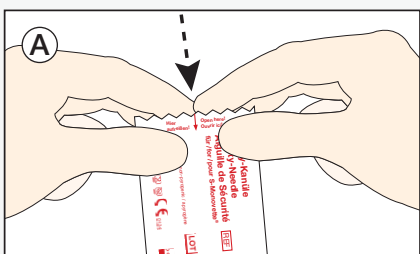


Obal natrhnete podél středové šipky.

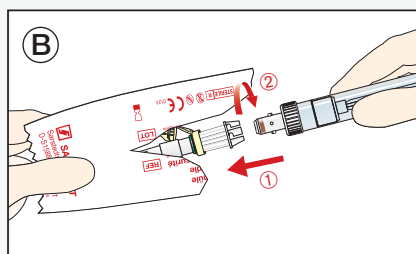


Zkumavku S-Monovette® spojte s držákem bezpečnostní jehly.

Po odběru krve

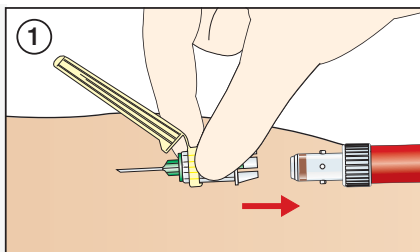


Poslední zkumavku S-Monovette® uvolněte z bezpečnostní jehly a poté bezpečnostní jehlu vytáhněte ze žíly.


Aktivace ochranného krytu...

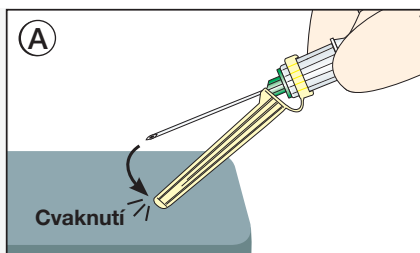

Ochranný kryt opřete o stabilní podložku a aktivujte.

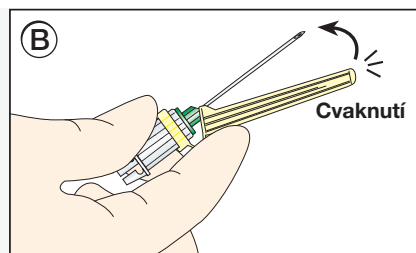

Alternativně můžete ochranný kryt aktivovat také ukazováčkem na spodním konci.

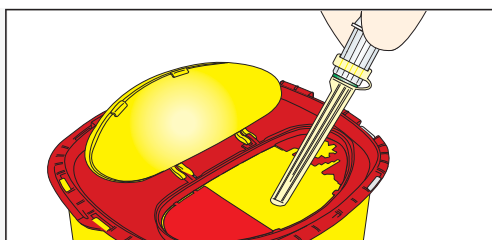


Zajištěnou bezpečnostní jehlu po aktivaci ochranného krytu odhazujte do kontejneru na zdravotnický odpad.


Bezpečnostní jehla-Multifly®

Informace o používání

Před odběrem krve

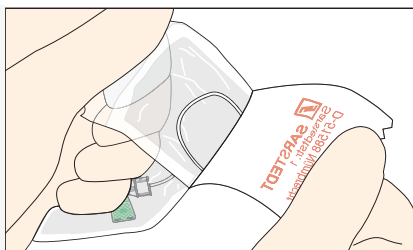


Obal otevřete palcem a ukazováčkem tak, že od sebe vrstvy odtrhnete.

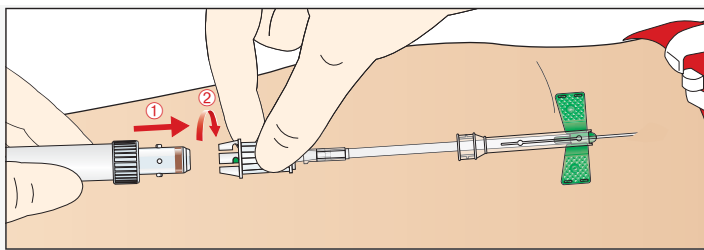

Zkumavku S-Monovette® spojte s držákem bezpečnostní jehly-Multifly®.


Po odběru krve

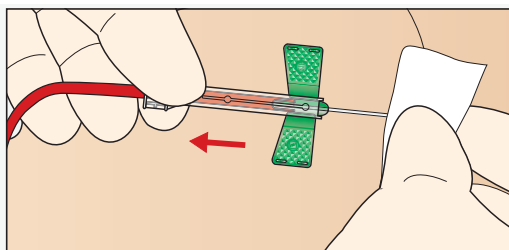

Uchopte ochranný kryt jehly nahoře i dole na zadním konci palcem a ukazováčkem a bezpečnostní jehlu-Multifly® vytáhněte ze žíly.


Aktivace ochranného krytu...

...v žíle

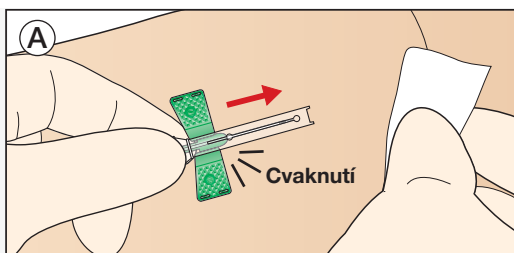


Ochranný kryt aktivujte paralelně s vytahováním bezpečnostní jehly-Multifly® ze žíly.

...mimo žílu

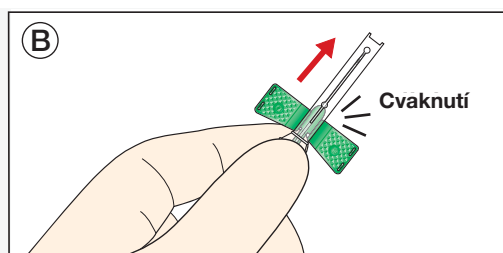

Bezpečnostní jehly-Multifly® vytáhněte ze žíly a aktivujte ochranný kryt.

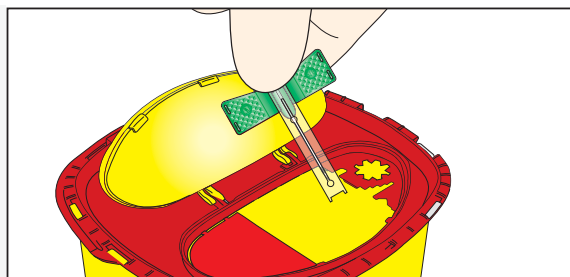

Zajištěnou bezpečnostní jehlu-Multifly® po aktivaci ochranného krytu odhazujte do kontejneru na zdravotnický odpad.

SARSTEDT spol. s r.o.
Pod Pekárnami 338/12
190 00 Praha 9
Tel: +420 281 021 491
Fax: +420 281 021 495
info.cz@sarstedt.com
www.sarstedt.com