



Безопасная игла

Инструкция по применению

До взятия крови

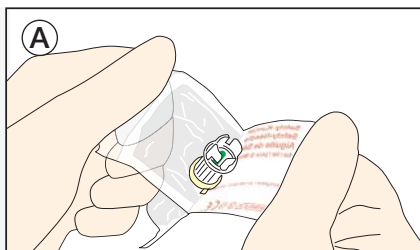


Вскройте упаковку большими и указательными пальцами методом отслаивания (peel-off).

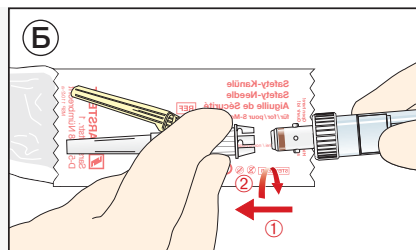


Соедините S-Monovette® с держателем безопасной иглы.

ИЛИ

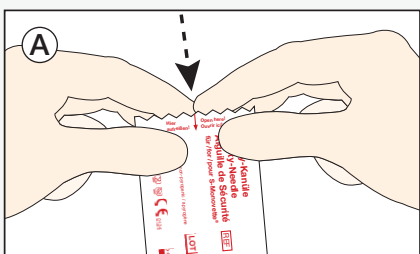


Разорвите упаковку по центру по направлению стрелки.

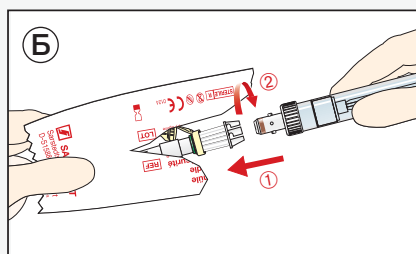


Соедините S-Monovette® с держателем безопасной иглы.

После взятия крови

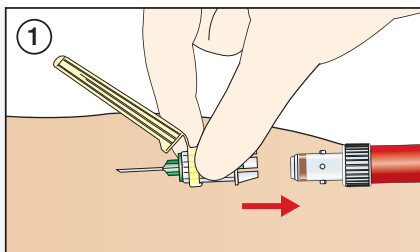


Отсоедините последнюю S-Monovette® от безопасной иглы, затем извлеките иглу из вены.


Активация механизма защиты иглы...

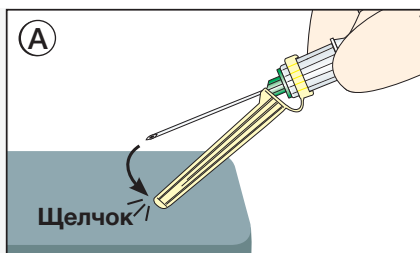

Установите защитный колпачок иглы на устойчивую поверхность и активируйте.

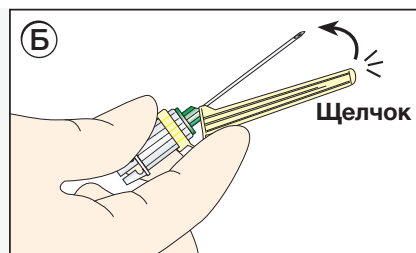

Также можно зафиксировать иглу в защитном колпачке, нажав на него указательным пальцем.

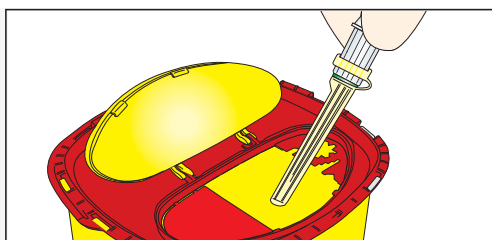


После активации механизма защиты поместите безопасную иглу в контейнер для утилизации.


Игла Safety-Multifly®

Инструкция по применению

До взятия крови

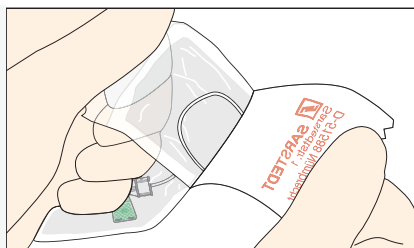


Вскройте упаковку большими и указательными пальцами методом отслаивания (peel-off).

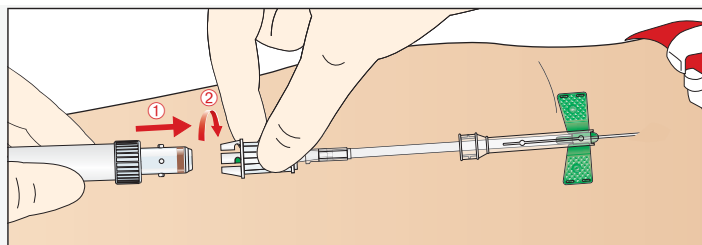

Соедините S-Monovette® с держателем иглы Safety-Multifly®.


После взятия крови

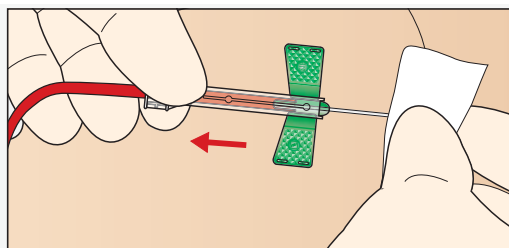

Возьмитесь большим и указательным пальцами сверху и снизу с заднего конца защитного колпачка и извлеките Safety-Multifly® из вены.


Активация механизма защиты иглы...

...В ВЕНЕ

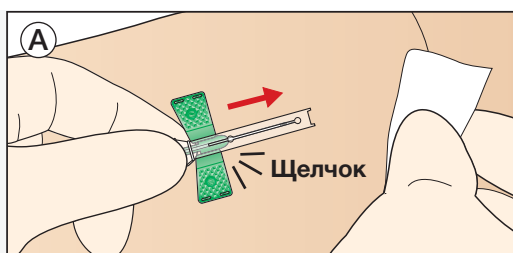


Активируйте механизм защиты иглы параллельно с извлечением иглы Safety-Multifly® из вены.

...ВНЕ ВЕНЫ

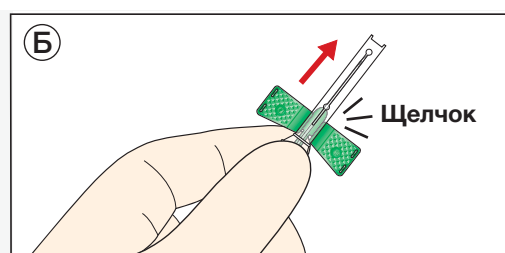

Извлеките иглу Safety-Multifly® из вены и активируйте защиту.

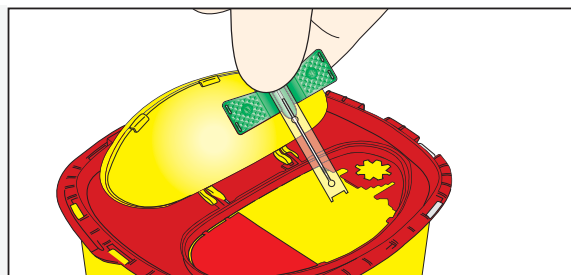

После активации механизма защиты поместите зафиксированную иглу Safety-Multifly® в контейнер для утилизации.

SARSTEDT AG & Co. KG
Представительство в Москве
Большой Строченовский пер. 7, офис 602
115054 Москва
Тел./факс: +7 495 937 52 28
info.ru@sarstedt.com
www.sarstedt.com