


Micro-Aguja

Características óptimas de flujo y manejo




Micro-Aguja


- Pérdida de sangre mínima sin volumen residual en el adaptador
- Punto de sujeción con estrías para un control óptimo
- Rotación de 360° para venas frágiles
- Flujo óptimo gracias a la excepcional calidad de la aguja y la abertura descubierta

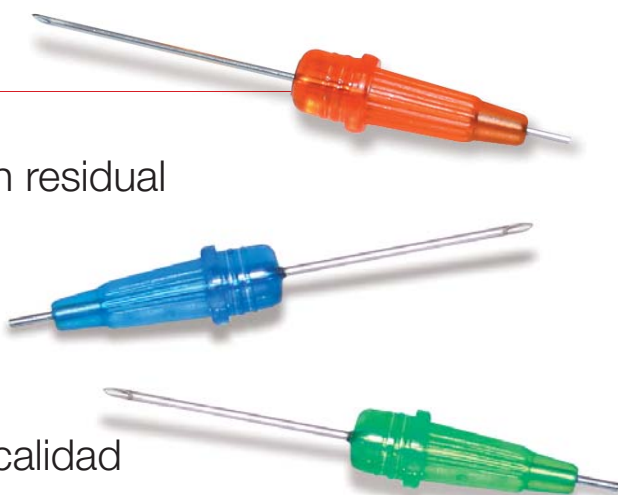

Extracción de sangre cómoda en neonatos y bebés prematuros

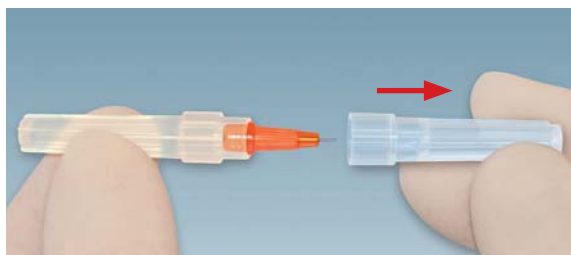

1 Retirar el tapón.

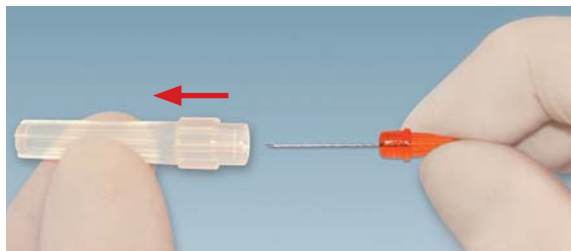

2 Sacar la Micro-Aguja del protector.



3 Realizar la venopunción y dejar gotear la sangre en un microtubo apropiado.



4 Desechar la Micro-Aguja en un recipiente de eliminación.

Información de pedido

Referencia	Descripción	Ø / Longitud	Presentación
85.921	Micro-Aguja 21G x 3/4", verde	0,8 mm / 36 mm	50 / caja interna, 500 / caja
85.923	Micro-Aguja 23G x 3/4", azul	0,6 mm / 36 mm	50 / caja interna, 500 / caja
85.925	Micro-Aguja 25G x 3/4", naranja	0,5 mm / 36 mm	50 / caja interna, 500 / caja

Sarstedt S.A.U.
Camí de Can Grau, 24
Pol. Ind. Valloriolf
08430 La Roca del Vallès
Tel: +34 93 846 4103
Fax: +34 93 846 3978
info.es@sarstedt.com
www.sarstedt.com

