

Lanceta de incisão Safety-Heel®

Punção do calcanhar em prematuros e recém-nascidos



Obtenção máxima de sangue com profundidade mínima de punção

Doenças metabólicas e distúrbios endócrinos congênitos devem ser detectados precocemente, a fim de introduzir um tratamento adequado e eficaz. Para isso, o sangue deve ser coletado através de uma “triagem neonatal” (na maioria das vezes, através de punção do calcanhar). Como a punção com lancetas comuns é realizada por uma picada vertical, o risco de ferimentos (perfuração até o osso) e de formação de hematomas é muito alto. Muitas vezes, este é um processo doloroso. A lanceta de incisão Safety-Heel® oferece a possibilidade de minimizar esta sensação de dor e, ao mesmo tempo, otimizar a obtenção de sangue.


O corte em semicírculo e a profundidade reduzida da punção neutralizam a formação de hematomas. Este procedimento permite uma coleta de sangue muito mais suave nos pequenos pacientes.

Lanceta inovadora de alta velocidade com tecnologia de corte suave em semicírculo

- Excelente fluxo de sangue sem necessidade de esfregar ou massagear o local a ser puncionado
- Volume de sangue suficiente
- Sensação de dor significativamente reduzida
- Rápida cicatrização graças à profundidade reduzida da punção
- A formação de hematomas é neutralizada




Lanceta de incisão Safety-Heel®

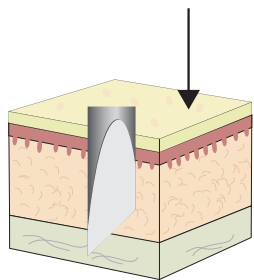

Lanceta padrão


- Sentido vertical de disparo da agulha
- Picada cilíndrica
- Formação de hematoma

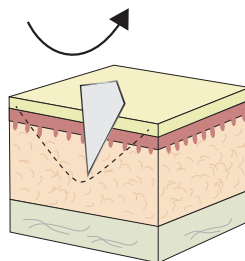


Lanceta de incisão

- Semicírculo como formato de corte
- Menor profundidade da punção
- A formação de hematomas é neutralizada


Manuseio da lanceta de incisão Safety-Heel®

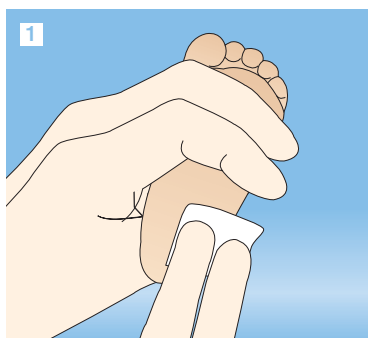


1 Selecionar e desinfetar o local de punção adequado.

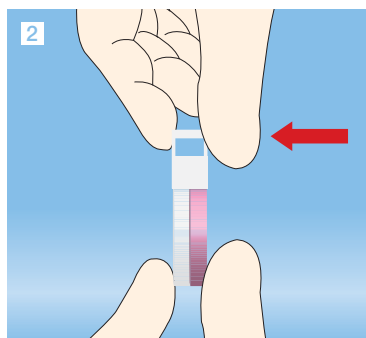


2 Remover o mecanismo de segurança, pressionando com o dedo lateralmente.

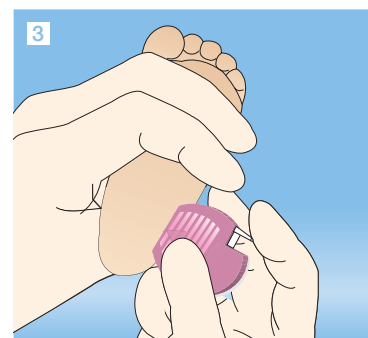


3 Levantar o pé para na posição adequada. Pressionar a abertura da lanceta de maneira plana sobre o local da punção selecionado e desinfetado, e ativar o botão de disparo. A lanceta de incisão de segurança deve ser posicionada e acionada **sempre paralelamente em relação ao comprimento do pé** (nunca na diagonal)! A ponta do triângulo indica o local por onde a agulha sai.

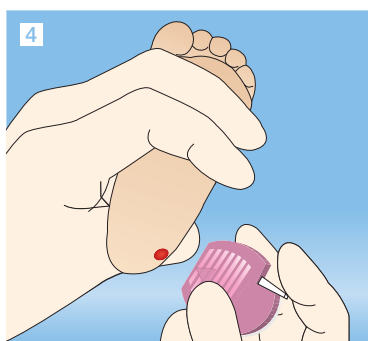

4 Após a ativação do botão de disparo, retirar a lanceta do calcanhar.

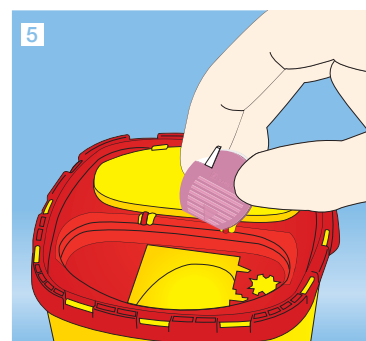

5 Descarte a lanceta em um recipiente de descarte adequado.

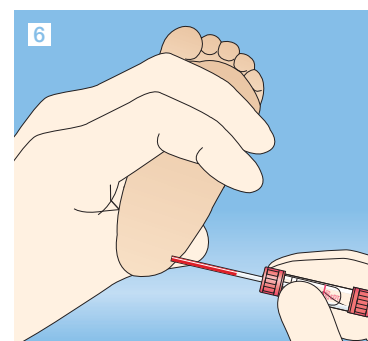

6 Desconsidere as primeiras gotas de sangue. Em seguida, faça a coleta com o capilar.

Informações para pedidos

	Código	Campo de aplicação	Profundidade da punção	Comprimento de corte	Embalagem
	85.1022	Recém-nascidos	1,0 mm	2,5 mm	50 /caixa interna 200/caixa externa
	85.1023	Prematuros	0,85 mm	1,75 mm	

Sarstedt LTDA
Alameda Ásia, 144
Polo Empresarial Tamboré
CEP 06543-312
Santana de Parnaíba - SP
Tel: +55 11 4152 2233
Fax: +55 11 4152 3198
info.br@sarstedt.com
www.sarstedt.com