


Slang Segment Opener

Makkelijk en veilig overbrengen van bloedmonsters uit een slang-segment

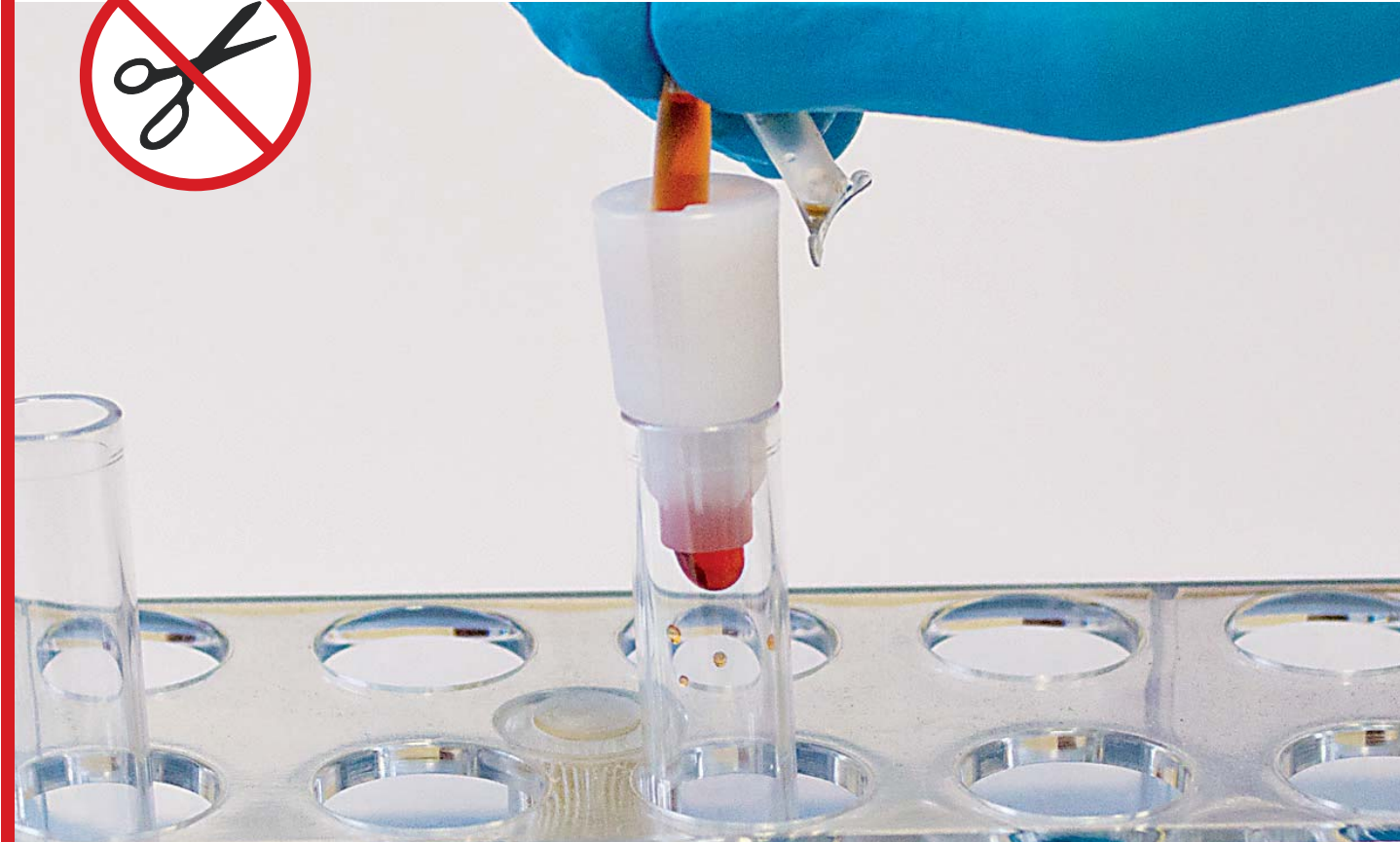

Slang Segment Opener

- Minimaliseert het risico van besmetting en verwonding van personeel
- Het gebruik van een schaar of mes is niet nodig
- Makkelijk en veilig in het gebruik



Slang Segment Opener



Steek de slang segment opener in een buisje en houd dit vast met één hand. Steek het stukje slang schuin in de opener (zie afb. a) en duw dit naar voren zonder de slang dicht te knijpen.

Knijp éénmaal in het uiteinde van het slang-segment om een kleine hoeveelheid bloed er uit te persen.

Vouw de slang dubbel en knijp om de slang leeg te maken. Druppelen wordt voorkomen door te stoppen met knijpen, dit om de druk van de slang te halen en wordt gedaan voordat deze uit de opener wordt getrokken.



Bestelgegevens

| Artikel nr. | Bestelgegevens | Verpakking |
|-------------|---|-----------------------------|
| 95.1000 | Slang segment opener voor binnendiameter 9,5-10,5 mm | 2.000 stuks/doos |
| 95.1000.476 | Slang segment opener gemonteerd op buis 55.476 | 400 stuks/doos, StackPack |
| 95.1000.800 | Slang segment opener voor binnendiameter 8,2 mm | 2.000 stuks/doos |
| 55.476 | Buis 5 ml 75 x Ø 12 mm PS stapelverpakking | 2.000 stuks/doos, StackPack |
| 55.476.005 | Buis 5 ml 75 x Ø 12 mm PS | 2.000 stuks/doos |
| 86.1509 | Buis 5 ml 75 x Ø 11,5 mm glas | 2.352 stuks/doos, StackPack |
| 95.1000.100 | Slang segment opener voor bed-side testen (lange naald) | 200/2.000 stuks/doos |

Sarstedt B.V.
 Penningweg 29
 4879 AE ETTEN-LEUR
 Tel: +31 (0)76 501 75 50
 Fax: +31 (0)76 501 76 26
 info.nl@sarstedt.com
 www.sarstedt.com

Sarstedt BVBA/SPRL
 Uitbreidingsstraat 84/3
 B-2600 BERCHEM
 Tel: +32 (0)3 541 76 92
 Fax: +32 (0)3 541 81 03
 info.be@sarstedt.com
 www.sarstedt.com

