


Устройство для открытия сегментных трубок

Легкое и безопасное извлечение крови из сегментных трубок

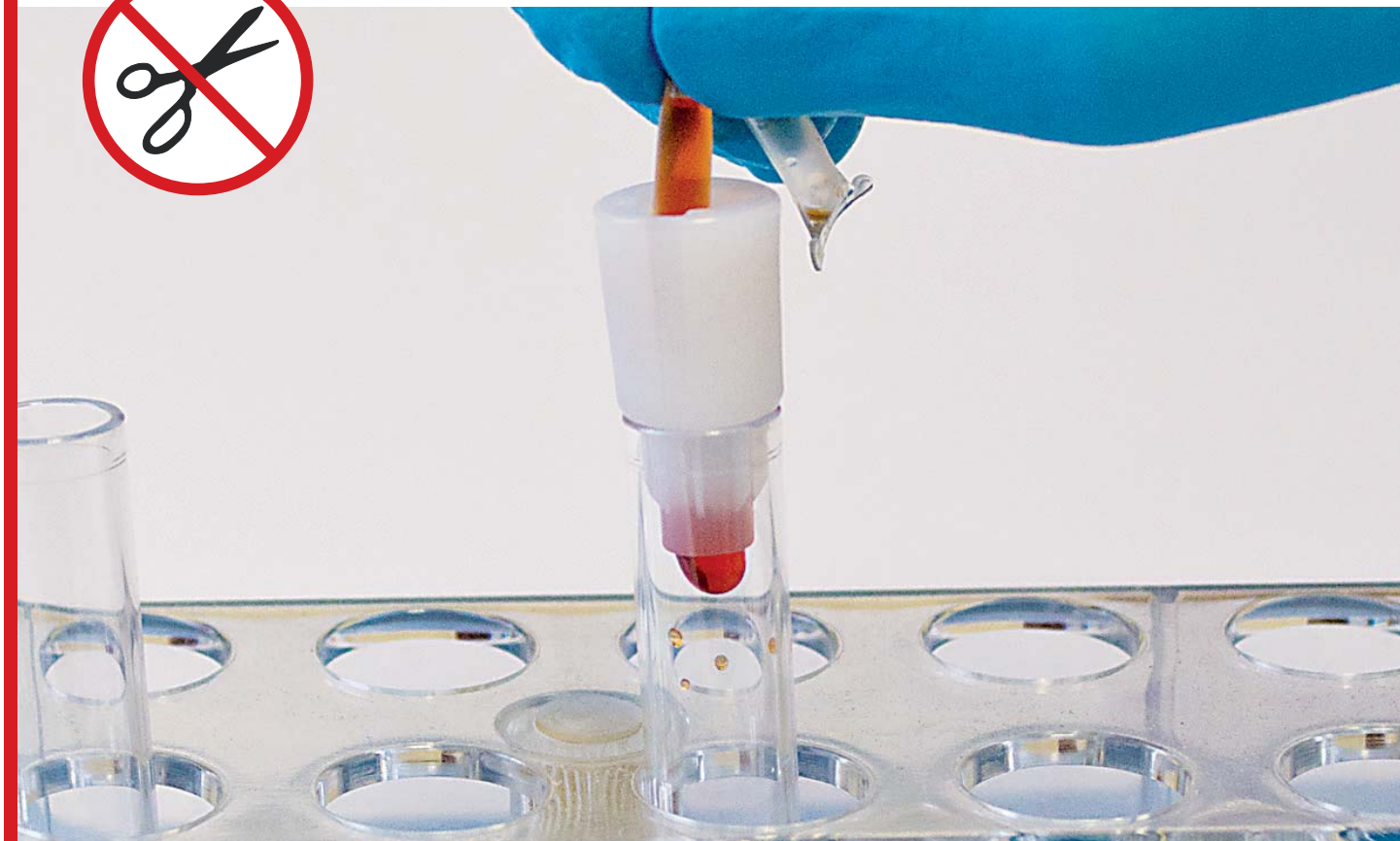

Устройство для открытия сегментных трубок


- Минимальный риск травмирования и контаминации
- Ножницы больше не нужны!
- Удобство и безопасность использования



Устройство для открытия сегментных трубок



Введите сегментную трубку в устройство под небольшим углом и продвиньте её вперёд, не пережимая.

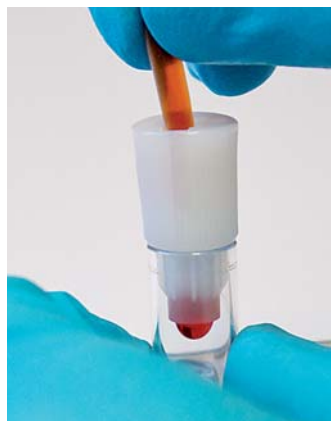

Нажмите на свободную часть сегментной трубки, чтобы получить первую каплю крови.



Для получения максимального количества крови из сегментной трубки сожмите и согните её. Ослабьте давление перед удалением сегментной трубки из устройства для снижения риска гемоконтакта.



Информация для заказа

Кат. №	Наименование	Упаковка
95.1000	Устройство для открытия сегментных трубок	2 000 шт. в коробке
95.1000.476	Устройство для СТ с пробиркой 75 x Ø 12 мм, в сборе	400 шт. в коробке
95.1000.800	Устройство для СТ для пробирок с внутр. Ø 8,2 мм	2 000 шт. в коробке
55.476	Пробирка 75 x Ø 12 мм, PS	2 000 шт. в коробке
55.476.005	Пробирка 75 x Ø 12 мм, PS	2 000 шт. в коробке
86.1509	Пробирка 75 x Ø 11,5 мм, стекло	2 352 шт. в коробке

SARSTEDT AG & Co. KG
115093 Москва
ул. Люсиновская 36 стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 937 52 28
info.ru@sarstedt.com
www.sarstedt.com