

# SMC 6 V

Güçlü ve deęişken olarak ayarlanabilir masa santrifüjü

**YENİ**  
Şimdi 2.500 x g ile




- 3 santrifüj programı deęişken olarak ayarlanabilir
- Maks. 2.500 x g deęerine kadar santrifüj
- Yüksek kalite ve kolay kullanım



## Kullanılabilir 3 santrifüj programı

Kullanılabilir 3 santrifüj programı mevcuttur.

- Program 1: Kan, 10 dakika süreyle 2.500 x g
- Program 2: İdrar, 5 dakika süreyle 500 x g
- Program 3, değişken olarak ayarlanabilir

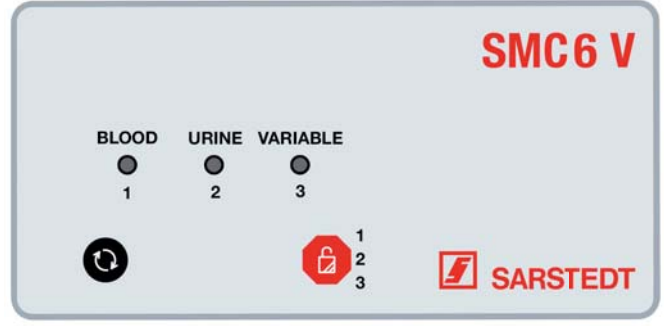

## Açılır rotor sayesinde optimal ayırma tabakası


SMC 6 V santrifüjü özellikle muayenehanelerde veya küçük laboratuvarlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve yaygın olan tüm örnek tüpleriyle kullanılabilir. Böylece kan alındıktan hemen sonra serum veya plazma tüplerinde güvenilir bir sarı bariyer oluşturulabilir. Bu difüzyon bariyeri sayesinde örneğin stabilitesi sağlanır.

### Açılır rotorlu santrifüj (SMC 6 V)

- Kalın ve stabil ayırma tabakası
- Analiz otomatları için daha fazla materyal mevcuttur

#### Açılır rotor


Jel tabakasını optimal şekilde belirginleştirmek için S-Monovette® santrifüjü için açılır rotorların kullanılmasını önermekteyiz.

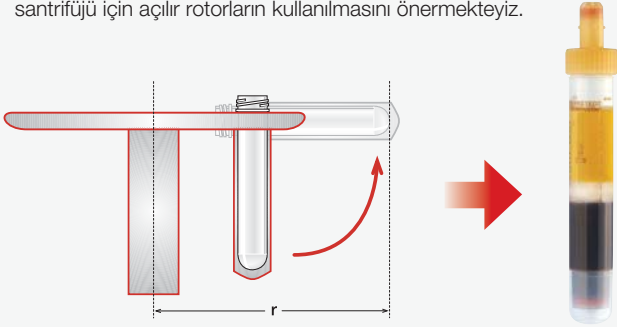

### Sabit açılı rotorlu santrifüj

- İnce ve instabil ayırma tabakası
- Analiz otomatları için daha az materyal mevcuttur

#### Sabit açılı rotor

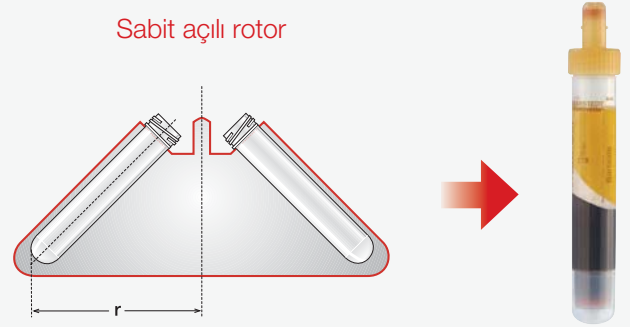

## Kolay kullanım

Sadece iki ya da üç tuşla son derece kolay kullanımı sayesinde hatalı kumanda ve devir ile sürenin yanlışlıkla değiştirilmesi mümkün değildir.

### Sipariş bilgileri

| Sipariş numarası | Tanım             |
|------------------|-------------------|
| 90.184.400       | Santrifüj SMC 6 V |

SARSTEDT International GmbH  
Türkiye İrtibat Bürosu, Acıbadem Mahallesi,  
Akasya Acıbadem Sitesi Kent Kule A  
Giriş Kat:27 Da:158  
Üsküdar – İstanbul  
Tel: +90 216 290 18 65  
Fax: +90 216 290 18 64  
info.tr@sarstedt.com, www.sarstedt.com