



***Sistema de colheita
de sangue para pediatria***

Pediatria

As crianças, são o grupo de pacientes mais sensível, necessitam de um sistema de colheita de sangue especial, mais delicado



Recém-nascidos



Crianças



Crianças em idade escolar

Os nossos pacientes (mais) pequenos

Mais nenhuma faixa etária apresenta exigências comparáveis quando se trata de um sistema de colheita de sangue. Por esse motivo, especializamo-nos nestas necessidades e desenvolvemos sistemas de colheita de sangue que permitem uma colheita delicada e tão indolor quanto possível para os pequenos pacientes e para os ainda mais pequenos.

O nosso foco foi minimizar ao máximo o respetivo volume de enchimento de forma a manter a perda de sangue de diagnóstico tão baixa quanto possível. Dependendo da idade, do peso e do volume de sangue, pode fazer a sua escolha dentro de uma vasta gama de produtos, tanto para colheitas de sangue capilar como de sangue venoso.

Temos a solução para as mais variadas exigências de cada faixa etária



Neonatologia – Recém-Nascidos

Volume de amostra mínimo para os pacientes mais pequenos

Micro-Agulha, Microtubos Preparados

e Safety-Heel®



Micro-Agulha e Microtubos Preparados

A Micro-Agulha foi concebida para as necessidades especiais da neonatologia e dispõe de uma pega estriada, que permite uma punção segura e otimizada. Existe em três diâmetros. Devido ao seu design curto, o volume morto é minimizado durante a colheita. Além de uma punção segura, o punho da Micro-Agulha também permite a rotação da cânula em posição horizontal na veia. Desta forma, exclui-se de maneira simples a possibilidade de bloqueio da abertura da agulha. Os Microtubos Preparados adequados para o efeito, com tampa de rosca ou pressão, e as Microvette para as quantidades de amostra mais pequenas estão disponíveis em diversos preparados. O intervalo de volume nominal vai de 100 µl até ao máximo de 1,3 ml em função do tipo de recipiente e de preparado.

Safety-Heel®

As doenças metabólicas congénitas e as endocrinopatias devem ser detetadas o mais precocemente possível, para se proceder a um tratamento adequado e eficaz. Para isso, é necessário colher sangue mediante um „rastreo do recém-nascido“ (normalmente por punção do calcanhar). Com as lancetas comuns, a punção é feita na vertical, sendo grande o risco de ferimentos (perfuração de várias camadas da pele até ao osso) e de formação de hematomas. Dado que este é, muitas vezes, um processo doloroso, com as lancetas de incisão Safety-Heel® tem uma excelente oportunidade para reduzir esta sensação de dor e otimizar a colheita de sangue. Com o Safety-Heel®, a formação de hematomas é minimizada por via de uma incisão semicircular e uma menor profundidade da picada, facilitando assim, consideravelmente o rastreo do seu pequeno paciente.

Utilização simples

Pega estriada, que permite uma punção simples e segura. Para o gotejamento, dispomos de um Microtubo Preparado adequado.



Safety-Heel®
A colheita de sangue mais suave com a lanceta no calcanhar...



Bebé – Criança

Colheita de sangue capilar para crianças pequenas



Microvette® e Lanceta de Segurança



Lanceta de Segurança e Microvette®

Para responder a cada necessidade, a Microvette® está disponível com o interior do tubo em forma cilíndrica e cônica, e com um intervalo de volumes entre 100 e 500 µl.

A colheita de sangue capilar pode ser feita através do capilar ou com o rebordo do tubo.

Além disso, as Microvette podem ser utilizadas como recipientes de gotejamento para a colheita aberta de sangue venoso.

As mais diversas variantes de lancetas de segurança permitem ao utilizador adaptar da melhor forma a profundidade da picada e a quantidade de sangue necessária às características anatómicas dos pequenos pacientes.

Microvette® – um produto, três aplicações

A Microvette® permite a colheita de sangue com capilar, com o rebordo do tubo ou como recipiente de gotejamento.



Microvette® 100/200 – colheita de sangue com capilar



Microvette® 300/500 – colheita de sangue com o rebordo do tubo



Microvette® como recipiente de gotejamento

Diversas possibilidades de punção com a lanceta de segurança



Criança – Criança em idade Escolar

Colheita de sangue venoso com os volumes de amostra mais pequenos




S-Monovette® e Safety-Multifly®



Agulha de Segurança Safety-Multifly® e S-Monovette®

A sensibilidade dos sistemas de análise modernos permite reduzir o volume de amostra necessário, mesmo no caso de investigações de rotina abrangentes. Graças ao seu design especial de dimensões reduzidas e ao tamanho mínimo do volume nominal, a S-Monovette® para pediatria corresponde da melhor forma a estas elevadas exigências. Devido à possibilidade de colheita de sangue delicada por meio da técnica de aspiração, a S-Monovette® para pediatria é uma solução ideal para as veias sensíveis dos pacientes pediátricos.

Extremamente seguro e confortável para paciente e utilizador

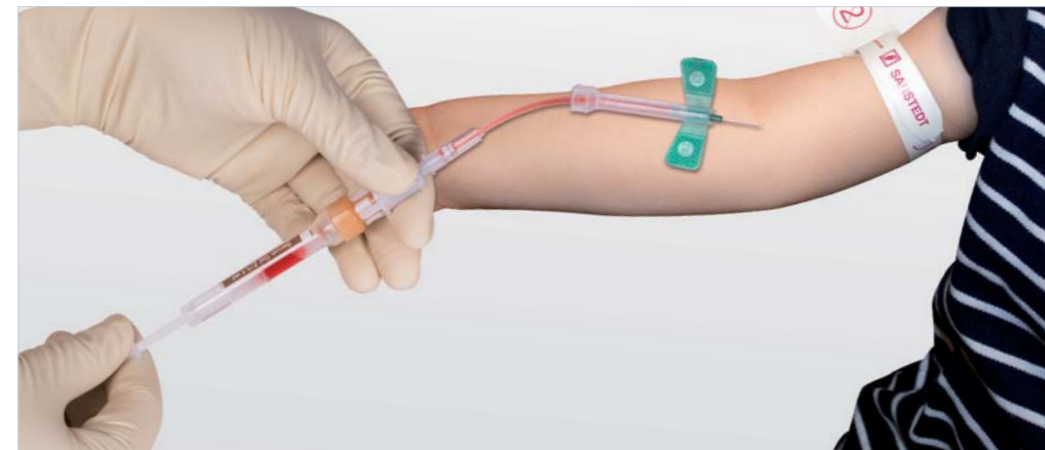

S-Monovette® e Microvette® (incluindo tubo de suporte apropriado)

	Soro	Soro-Gel	Heparina-Lítio	Heparina-Lítio-Gel	EDTA	Fluoreto	Coagulação, citrato	V.S.
S-Monovette® 1,1/1,2 ml 8 mm Ø _{1,3}	06.1663.001	06.1667.001	06.1666.001	06.1669.001	06.1664.001	06.1665.001	06.1668.001	05.1079*
Microvette® 500 µl _{1,2}	20.1343	20.1344	20.1345	20.1346	20.1341			
Microvette® 300 µl _{1,2}	20.1308		20.1309			20.1307		
Microvette® 200 µl _{1,2}	20.1290	20.1291	20.1292		20.1288	20.1289		
Microvette® 100 µl _{1,2}	20.1280		20.1282		20.1278			
Microvette® CB 200 BSG ^{1,2}								18.1325

* S-Monovette® 2 ml, 66 x 11 mm Ø

¹ Indicado para tubo de suporte 75 x 13, ref.ª 55.1571

² Indicado para tubo de suporte 75 x 13, ref.ª 55.525.003

³ Indicado para tubo de suporte 65 x 13, ref.ª 55.1572

Microtubos Preparados


	Soro	Soro-Gel	Heparina-lítio	EDTA	Fluoreto	Coagulação, citrato
Microtubos Preparados 1,3 ml com tampa de pressão	41.1501.005	41.1500.005	41.1503.005	41.1504.005	41.1505.005	41.1506.005
Microtubos Preparados 1,0 ml com tampa de pressão						41.1506
Microtubos Preparados 0,5 ml com tampa de pressão						41.1506.002
Microtubos Preparados 1,3 ml com tampa de rosca	41.1392.005		41.1393.005	41.1395.005	41.1394.005	41.1350.005
Microtubos Preparados 1,3 ml com tampa de rosca perfurável				41.3395.005		
Microtubos Preparados 1,1 ml com tampa de rosca		41.1378.005				

Micro-Agulha, Lanceta de Segurança, Lanceta de Incisão Safety-Heel®, Safety-Multifly®

	21 G x 3/4"	23 G x 3/4"	25 G x 3/4"	28 G	Lâmina 1,5 reta	Lâmina 1,75 incisão	Lâmina 2,5 incisão
Micro-Agulha	85.921	85.923	85.925				
Lanceta de Segurança				85.1015	85.1019		
Safety-Heel® Lanceta de Incisão						85.1023	85.1022
Safety-Multifly®	85.1638.205	85.1640.205	85.1642.205				

Suporte V.S. para Microvette® CB 200

Ref.ª	Material	Versão	Embalagem unidade/caixa
90.1091	Plástico	Suporte V.S. para Microvette® CB 200	1

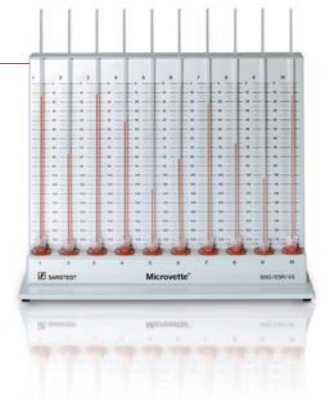

Monovette® para urina

Ref.ª	Volume em ml	Comprimento do tubo/Ø em mm	Versão	Embalagem unidade/caixa
10.250.001	3,2	75/13	com rótulo de papel, incluindo cânula de aspiração	512





*Se tiver dúvidas:
teremos todo
o prazer em ajudá-lo
em segurança!*

 **SARSTEDT**

Sarstedt S.A.
Estrada Nacional 249, Km 4,2
Escritório B r/c - Nave 3
Cabra Figa
2635-047 RIO DE MOURO
Tel: +351 21 915 6010
Fax: +351 21 915 6019
info.pt@sarstedt.com
www.sarstedt.com