

S-Monovette® POC Collect Kit

Контролируемая процедура взятия и дозирования проб крови



Исключение
ошибок при
диагностике у
постели пациента!



SARSTEDT

Для диагностики из венозной и артериальной крови!

S-Monovette® POC Collect Kit

- Снижение издержек на тест-картриджи
- Простое, контролируемое дозирование проб
- Сокращение времени обработки
- Повышение качества обслуживания пациентов
- Максимальная безопасность благодаря закрытому переносу крови

Набор S-Monovette® POC Collect Kit подходит для взятия венозной/артериальной крови из выходов сосудистого доступа и контролируемого (с точностью до капли) дозирования проб в тест-картриджи у постели пациента. Для выполнения подтверждающего теста после процедуры дозирования пробы отправьте S-Monovette® в лабораторию.

Набор S-Monovette® POC Collect Kit значительно снижает частоту ошибок и обеспечивает безопасность процедуры для конечного пользователя.

- Руководитель клиники на 387 мест



Устранить или свести к минимуму источники ошибок:

- Переполнение
- Недостаточное заполнение
- Пузырьки воздуха
- Сложность в обращении

Три больницы провели в общей сложности 27 630 анализов у постели пациента. Новый набор S-Monovette® POC Collect Kit позволил снизить число поддающихся коррекции ошибок в среднем с 15 % до менее 1 %.

Не было зафиксировано ни одного переполненного (самая распространенная ошибка) тест-картриджа!

НОВИНКА



Больница А - частота поддающихся коррекции ошибок снижена до 1,06 %

Где	Общее число тест-картриджей	Период	Число отбракованных тест-картриджей	Относительная доля отбракованных тест-картриджей
По всей больнице	5015	7 месяцев	53	1,06 %

Больница Б - частота поддающихся коррекции ошибок снижена до 0,95 %

Где	Общее число тест-картриджей	Период	Число отбракованных тест-картриджей	Относительная доля отбракованных тест-картриджей
По всей больнице	7 976	12 месяцев	76	0,95 %

Больница В - частота поддающихся коррекции ошибок снижена до 0,65 %

Где	Общее число тест-картриджей	Период	Число отбракованных тест-картриджей	Относительная доля отбракованных тест-картриджей
По всей больнице	14 639	9 месяцев	95	0,65 %

Компоненты набора:


- Мультиадаптер Luer-Lock для подсоединения к выходу сосудистого доступа
- РОСТ DISPENSER для дозирования проб
- S-Monovette® 1,2мл литий-гепарин для взятия и дозирования проб крови

Информация для заказа



Кат. №	Наименование	Упаковка
51.5100.100	S-Monovette® РОС Collect Kit:	1 набор в Zip-пакете 50 шт. в коробке



Инструкция по применению

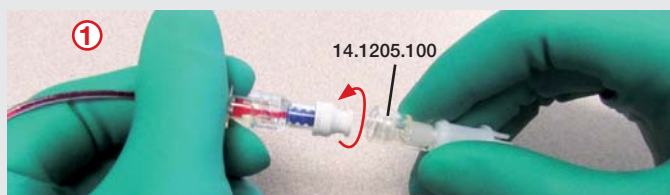

Подготовьте сосудистый доступ к процедуре согласно требованиям Вашего учреждения. Подсоедините мультиадаптер Luer-Lock к выходу сосудистого доступа.

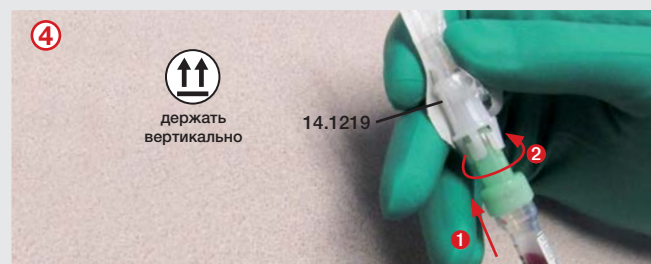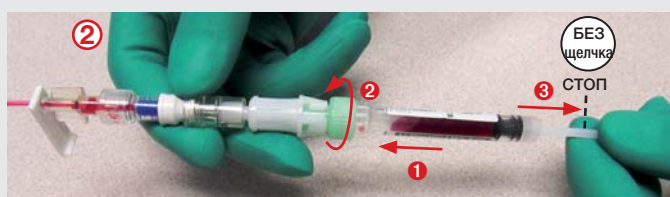

1. Удалите первую/первые капли крови согласно регламенту теста.
2. Выдавите каплю крови на тестовую зону картриджа, осторожно надавливая на шток поршня.

SARSTEDT AG & Co. KG
Представительство в Москве
Большой Строченовский пер. 7, офис 602
115054 Москва
Тел./факс: +7 495 937 52 28
info.ru@sarstedt.com
www.sarstedt.com