

S-Monovette® POC Collect Kit

Prelievo di sangue e dispensazione del campione controllati



Prevenzione
degli errori
nella diagnostica
point-of-care!



SARSTEDT

Per TUTTI i campioni POC venosi e arteriosi!

S-Monovette® POC Collect Kit

- Riduzione del fabbisogno supplementare di cartucce per test
- Dispensazione del campione semplice e controllata
- Turn Around Time più breve
- Migliore trattamento del paziente
- Massima sicurezza grazie al trasferimento di sangue a circuito chiuso

L'S-Monovette® POC Collect Kit è indicato per il prelievo controllato di sangue venoso/arterioso da linee di accesso vascolare e per la dispensazione controllata del campione (con precisione alla goccia) sulle cartucce per test point-of-care. Dopo la dispensazione del campione, la S-Monovette® può essere inviata direttamente al laboratorio se è richiesto un test di conferma; in termini di Patient Blood Management non è necessario alcun prelievo ematico supplementare.

L'S-Monovette® POC Collect Kit riduce la suscettibilità agli errori in misura significativa e consente all'operatore finale di potere contare sull'affidabilità del processo.

- Responsabile di laboratorio presso una clinica con 387 posti letto



Eliminare o ridurre le fonti di errore controllabili:

- Riempimento eccessivo
- Riempimento insufficiente
- Bolle d'aria
- Manipolazione complessa

Tre grandi ospedali hanno condotto in totale 27.630 test point-of-care. Il nuovo S-Monovette® POC Collect Kit ha ridotto il numero di errori controllabili da una media del 15% a meno dell'1%. E questo senza riempimento eccessivo di nessuna singola cartuccia per test, l'errore più comune.

NOVITÀ



Ospedale A - Errori controllabili ridotti all'1,06%

Luogo	Numero di cartucce per test totali	Intervallo temporale	Numero di cartucce per test non misurate	Percentuale relativa di cartucce per test non misurate
Intero ospedale	5.015	7 mesi	53	1,06%

Ospedale B - Errori controllabili ridotti allo 0,95%

Luogo	Numero di cartucce per test totali	Intervallo temporale	Numero di cartucce per test non misurate	Percentuale relativa di cartucce per test non misurate
Intero ospedale	7.976	12 mesi	76	0,95%

Ospedale C - Errori controllabili ridotti allo 0,65%

Luogo	Numero di cartucce per test totali	Intervallo temporale	Numero di cartucce per test non misurate	Percentuale relativa di cartucce per test non misurate
Intero ospedale	14.639	9 mesi	95	0,65%

Componenti del kit:


- **Adattatore multiplo Luer Lock** per il collegamento alle linee di accesso vascolare
- **POCT DISPENSER** per la dispensazione del campione
- **S-Monovette® 1,2ml Litio-eparina** per il prelievo di sangue e la dispensazione del campione

Informazioni per l'ordine

Ordine n.	Denominazione	Imballaggio
51.5100.100	S-Monovette® POC Collect Kit	1 kit / busta con zip 50 pezzi/cartone




Istruzioni per l'uso

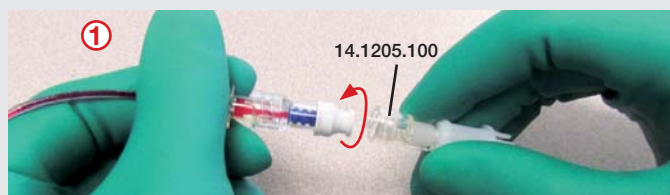

Preparare l'accesso vascolare per il prelievo secondo le disposizioni interne del proprio istituto. Collegare l'adattatore multiplo Luer Lock alla linea di accesso vascolare.



tenere in posizione verticale

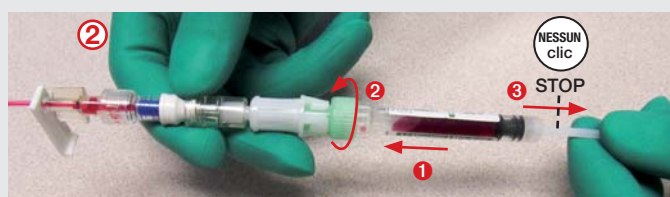

1. Scartare la o le prime gocce conformemente ai requisiti dell'istituto o del test e
2. dispensare il campione sulla cartuccia per test, afferrando il bordo inferiore dello stantuffo e spostando quest'ultimo in avanti con cautela

SARSTEDT S.r.l.
Via Leonardo da Vinci, 97
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Tel: +39 02 38292413
Fax: +39 02 38292380
info.it@sarstedt.com
www.sarstedt.com