

Ein-Patienten-Staubbinde

entwickelt zur effektiven Infektions-Prävention

NEU!



- Patientenbezogene Mehrfachverwendung zum Schutz vor Kreuzkontamination
- Sehr weiches, latexfreies Material für einen erhöhten Patientenkomfort
- Intuitiv einfache Handhabung
- Eine Größe passend für Kleinstkinder und Erwachsene

Einfache Handhabung durch Einhandtechnik

Der TourniSTRETCH® wurde entwickelt, um eine effiziente Infektions-Prävention anzubieten.

Hergestellt aus einem anpassungsfähigen Material, unterstützt es den Anwender mit einer starken, sicheren Elastizität für optimales Spannen während ein weiches, flexibles Gefühl für den Patienten erhalten bleibt.

Das intuitive System beim Einfädeln der Staubinde, einfaches Nachspannen und schnelles Lösen bietet den Anwendern eine einfache Handhabung und unterstützt die Einhandtechnik bei der Blutentnahme.



Handhabung



TourniSTRETCH® um den Arm legen, Knopf zeigt nach oben



Staubinde durch die Schnalle ziehen und entsprechend spannen



Das Ende der Staubinde über den Knopf ziehen, um in Position zu sichern



Weitere Informationen finden Sie unter

www.sarstedt.com/tournistretch

Bestellinformation

Bestell-Nummer	Bezeichnung	Verpackung
95.1008	TourniSTRETCH® Ein-Patienten-Staubinde	25 Stk. / Beutel 500 Stk. / Karton

SARSTEDT AG & Co. KG
Postfach 12 20 · D-51582 Nümbrecht
Telefon +49 22 93 305-0
Telefax +49 22 93 305-3450
Service 0800 (Deutschland)
Telefon (0800) 0 83 305-0
info@sarstedt.com
www.sarstedt.com