

Bezpieczne usuwanie odpadów dzięki Multi-Safe twin 500 plus

Możliwości montażu

Wariant A



Pokrywę nałożyć centralnie na górną część pojemnika. Poprzez jednoczesne naciśnięcie dwoma kciukami po prawej i lewej stronie obok zagłębień w pokrywie wcisnąć pokrywę mocno na górną część, aż do słyszalnego i widocznego zatrzaśnięcia krawędzi zewnętrznej żółtej górnej części pojemnika (1). Powtórzyć tę czynność dookoła również dla pozostałych zagłębień (2-6).

Wariant B



Pokrywę położyć na stabilnej powierzchni i od góry nałożyć górną część pojemnika na odpady na pokrywę. Odwrócony do góry nogami pojemnik wcisnąć mocno w pokrywę, tak aby krawędź zewnętrzna górnej części pojemnika słyszalnie i widocznie zatrzaśnęła się dookoła.

Pokrywa dzienna



Naciśnięcie środka pokrywy (1) powoduje kompletne zatrzaśnięcie się pokrywy dziennej, zapewniające prawidłowe zamknięcie.

Uwaga: podczas otwierania pokrywy dziennej **nie** naciskać na pokrywę końcową (2).

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie napełniać powyżej linii napełnienia.
- Nie wciskać żadnych przedmiotów na siłę do pojemnika.
- Nie wkładać ręki ani nie sięgać do wnętrza pojemnika.
- Nie wlewać płynów.
- Przed zamknięciem pokrywy dziennej upewnić się, że z otworu nie wystają żadne przedmioty.
- Pojemnika nie ścisnąć w jakikolwiek sposób od zewnątrz ani nie rzucać pojemnikiem.

SARSTEDT Sp. z o.o.
ul. Warszawska 25
Blizne Łaszczyńskiego
05-082 Stare Babice
Tel: +48 22 722 05 43
Fax: +48 22 722 07 95
info.pl@sarstedt.com
www.sarstedt.com