

# Smaltimento sicuro con il Multi-Safe twin 500 plus

## Le opzioni di montaggio

### Variante A



Applicare il coperchio centrato sulla parte inferiore del contenitore. Premendo contemporaneamente con entrambi i pollici a destra e a sinistra accanto ai fori presenti sul coperchio, premere a fondo il coperchio sulla parte inferiore finché il bordo esterno della parte inferiore gialla non scatta percettibilmente e visibilmente in sede (1).


Ripetere l'intera procedura anche per i restanti fori (2-6).

### Variante B



Posizionare il coperchio su una superficie stabile e applicare dall'alto la parte superiore del contenitore di smaltimento sul coperchio. Premere a fondo la parte inferiore sul coperchio in modo che il bordo interno della parte inferiore scatti percettibilmente e visibilmente in sede lungo l'intero bordo.

## Chiusura giornaliera

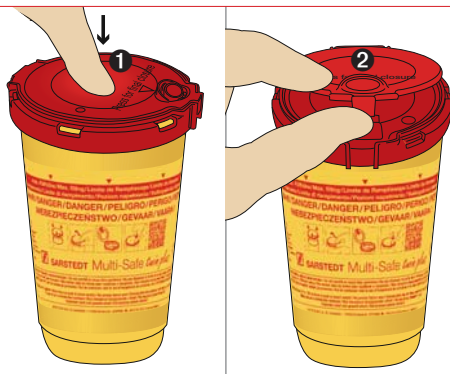

Premendo sul centro del coperchio (1), la chiusura si blocca completamente, chiudendo così in modo corretto la chiusura giornaliera.

**Attenzione:** quando si apre la chiusura giornaliera **non** premere sulla chiusura definitiva (2).

## Indicazioni di sicurezza

- Non riempire oltre la linea di riempimento contrassegnata.
- Non introdurre gli oggetti nel contenitore spingendoli con forza.
- Non cercare di afferrare con la mano oggetti all'interno del contenitore.
- Non introdurre sostanze liquide.
- Prima di chiudere il coperchio accertarsi che non vi siano oggetti che sporgono dall'apertura.
- Non schiacciare il contenitore dall'esterno in alcun modo, né lanciare il contenitore.

SARSTEDT S.r.l.  
Via Leonardo Da Vinci, 97  
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)  
Tel: +39 02 38292413  
Fax: +39 02 38292380  
info.it@sarstedt.com  
www.sarstedt.com

 **SARSTEDT**