


# Richtiges Mischen der Blutgas-Monovette®

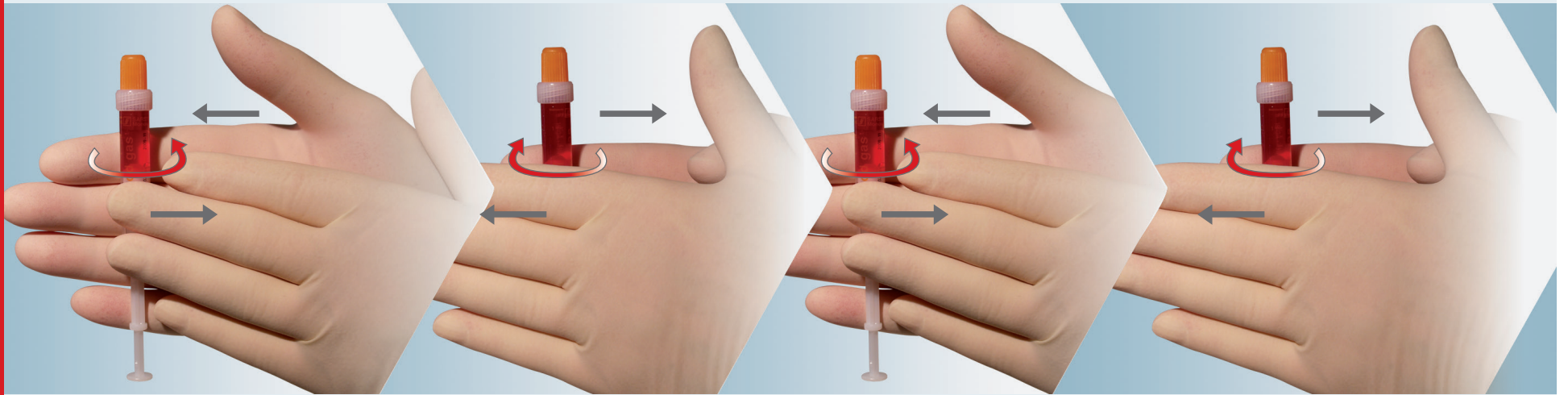

Technische Änderungen vorbehalten


Diese Publikation kann Informationen zu Produkten enthalten, die evtl. nicht in jedem Land verfügbar sind

## Achtung:

Im Gegensatz zum Überkopfmischen, das bei den Standard-Monovetten durch die Luftblase unterstützt wird, muss beim Mischen der Blutgas-Monovette® wie folgt vorgegangen werden:

Zum Mischen der Blutgas-Monovette® ist das **Rollen** in den Handflächen dem Überkopfmischen vorzuziehen!

# Blood Gas Monovette®

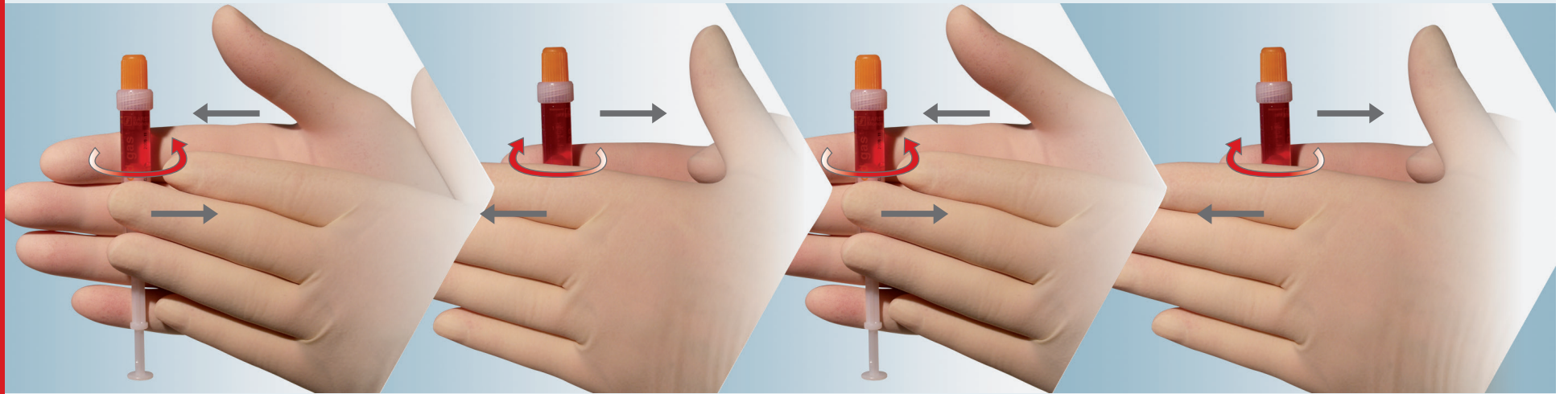

## Note:

While standard S-Monovettes are mixed in an inverted position, supported by the air bubble in the tube, the Blood Gas Monovette® must be mixed by rolling the tube between your palms.

Technical modifications reserved

This document may contain information on products that may not be available in particular countries

700-142